

سوالات متداول

• آیا تزریق باعث آسیب به پوست می‌شود؟

در محل تزریق، گاهی اوقات تورم، کبودی یا قرمزی مختصر دیده می‌شود که گذراست و نهایتاً ظرف چند روز برطرف می‌گردد.

• آیا ممکن است ناحیه‌ای که تحت تزریق قرار گرفته است غیر معمول به نظر رسد؟

استفاده از فیلرهای با کیفیت باعث می‌شود فیلر به سرعت با بافت پوست یکی شده و کاملاً بکثواخت به نظر برسد. این مسئله به خصوص برای نواحی مانند لب که می‌خواهید نتایج مناسب تزریق را ببینید اما لزوماً غیر طبیعی به نظر نرسد اهمیت دارد.

• پس از تزریق چه مراقبت‌هایی لازم است؟

پس از تزریق برای کاهش کبودی و ورم در ناحیه مورد نظر از کمپرس یخ استفاده کنید و از دراز کشیدن و پایین نگه داشتن سر تا ۴ ساعت پس از تزریق خودداری کنید. از فشار دادن و مالش محل تزریق و نیز خوابیدن روی صورت در روزهای ابتدای خودداری کنید. تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از شستشوی صورت با آب داغ اجتناب کنید. از آرایش صورت در ۱۲ ساعت اولیه پس از تزریق خودداری کنید. در دو هفته ابتدای پس از تزریق از رفتن به سونا، سولاریوم و همچنین، قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید و اشعه فرابنفش خودداری کنید.

• اثرات درمان تا چه مدت باقی می‌ماند؟

بسته به نوع فیلر، ناحیه مصرف، تکنیک تزریق، پوست فرد و ... ماندگاری آن می‌تواند متفاوت باشد اما در اغلب موارد بین ۶ تا ۱۸ ماه باقی می‌ماند.

*Sense Of
Confidence*



MEDISA ARA
GOSTAR P.J.S.C.



+98 21 82430 (752)

info@medisaara.com

inivosense.com

inivosense

No.21, Jooybar Alley, Shad St.,
Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran.

INOVO
SENSE

فیلر اینوسنس

با افزایش سن، تولید مرطوب کننده‌های طبیعی پوست نظیر هیالورونیک اسید و کلاژن کاهش می‌یابد که در ابتدا منجر به پیدایش خطوط ظریف در چهره شده و تدریجاً تبدیل به خطوط عمیق‌تر در پوست می‌شود. ترکیب هیالورونیک اسید به طور طبیعی در بدن انسان وجود دارد و در حفظ زیبایی و جوانی پوست بسیار حائز اهمیت است. اینوسنس از جمله فیلرهای HA می‌باشد که با برقراری توازن بین خواص رئولوژیکی در فرمولاسیون خود به یکی از فیلرهای محبوب تبدیل شده است. از مزایای فیلر اینوسنس می‌توان به تنوع بی‌نظیر آن جهت رفع نیازهای پوستی هر فرد و حصول نتایج سریع، راحت، طبیعی و ایمن اشاره کرد. همچنین، این محصول با افزودن لیدوکائین و به کارگیری نازک‌ترین سوزن‌ها، تزریقی آسان و بدون درد را برای راحتی بیماران فراهم می‌نماید.

INNOVO SENSE

STYLE / SHAPE

SILK

STYLE / SHAPE

SHINE

SILK

STYLE / SHAPE

STYLE / SHAPE

SHINE

SILK

SILK

SMILE / STYLE

SMILE / STYLE

SMILE

SMILE

SHINE

SHINE

SHINE

- آبرسانی پوست در نواحی:

- صورت
- گردن
- دکانه
- پشت دست‌ها

SILK

- اصلاح چین و چروک‌های سطحی صورت شامل:

- خط اخم
- خطوط کوچک اطراف چشم
- خطوط ریز پشت و حاشیه لب
- کانتورینگ لب‌ها

SMILE

- اصلاح چین و چروک‌های متوسط صورت شامل:

- خط خنده
- خطوط کنارها و گوشه لب
- حجم دهی لب‌ها

STYLE

- اصلاح چین و چروک‌های عمیق صورت شامل:

- چین‌های عمیق خط خنده
- لیفتینگ در نواحی گونه، چانه و شقیقه

SHAPE

- کانتورینگ و بازیابی حجم از دست رفته صورت شامل:

- حجم دهی گونه
- اصلاح چانه
- زاویه دهی فک
- اصلاح کودی شقیقه

